



## Bruerveiledning Atellica DCA Analyzer

Det anbefales å registrere pasient-ID ved analysering. Funksjonen blir tilgjengelig på instrumentet ved å velge  Hjem → Avansert → Alternativer → Pasientdemografi → Pasient-ID → Velg aktiver og påkrevd.

1. Fjern folien fra reagenskassetten. Ikke bruk saks. HbA1C reagenskassetten må brukes innen 1 time etter at folien er fjernet. AKR reagenskassetten må brukes innen 10 minutter etter at folien er fjernet.
2. Åpne pakningen for kapillærrørholder.
3. Fyll kapillærrørholderen med 1 uL blod for HbA1c og 40mL urin for AKR.  
Etter at kapillærrøret er fylt med blod må testen starte innen 4 minutter for HbA1c og direkte etter prøvetilsetning av urin for AKR test.
4. Sett kapillærrørholderen ned i reagenskassetten med den flate siden vendt mot kassetten. Trykk den ned til den klikker på plass. Ikke berør avlesningsvinduet på reagenskassetten.
5. Åpne kassettdøren og sett reagenskassetten god ned i kassettrommet til du hører et klikk. Et lys-signal viser også at kassettsens 2D kode blir lest. Testen må starte innen 15 sekunder etter at kassettdøren ble åpnet.
6. Hold på kassetten og dra av fliken. Dette gjøres ved å dra rett oppover med en jevn og bestemt bevegelse.
7. Lukk kassettdøren. Status for testen vises på displayet.
8. Trykk på symbolet for påkrevd informasjon  for å legge inn pasient-ID, enten via strekkodeleseren på displayet eller via tastaturet på displayet.
9. Prøveresultater foreligger etter 5 minutter for HbA1c og 7 minutter for AKR.  
Displayet viser «Resultat er tilgjengelig», trykk på modullknappen for å få opp resultatet.
10. Trykk Fortsett og følg anvisningen på skjermen og ta ut reagenskassetten ut av instrumentet.